

個人防護具 簡易セット




- ✓ 熱性疾患や感染症患者の検診時に。
- ✓ 往診や訪問看護等の在宅医療のお供に。
- ✓ PCR検査時やワクチン接種時の感染予防対策に。

使い捨て
タイプ

1人用
フリーサイズ

セット内容

- 1 不織布ヘアキャップ**
ゴム部はラテックスフリー素材を使用
- 2 N95マスク**
米国NIOSH規格のN95マスク
- 3 フェイスシールド**
眼鏡をかけての装着も可能
曇り止め加工でクリアな視界
※両面の保護フィルムを剥がしてご使用ください。
- 4 袖付エプロン**
ポリエチレン製・指掛けタイプ
- 5 ニトリル手袋**
二重装着の内側用グローブ
- 6 プラスチック手袋**
二重装着の外側用グローブ
- 7 シューズカバー**
底部に滑り止め加工
- 8 ゴミ袋**
廃棄用の回収袋(透明ポリ袋45L)
※作業終了後の回収袋は、所定の場所に適切に廃棄してください。

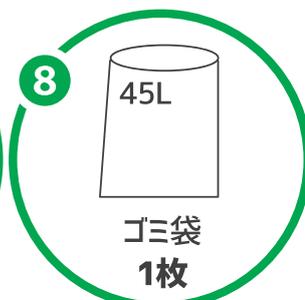

8種
セット


○製品仕様は改良等のために変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

商品コード	品名・規格	参考小売価	JANコード
900791	個人防護具簡易セット	オープン	49 68138 900790

感染症対策に必要な
個人防護具一人分を一
式取り揃えました。
さまざまな場所で、
ご使用いただけます。



● 熱性疾患や感染症患者の検診時や、受付・入場のスタッフに。

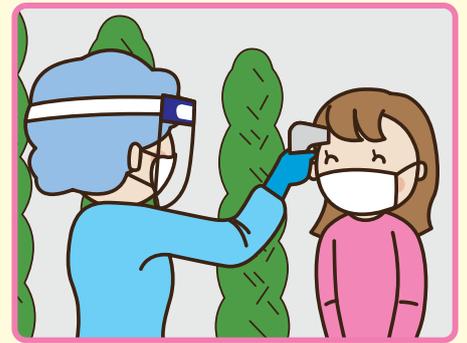

● 往診や訪問看護等の在宅医療、家族の療養時のお供に。



● PCR検査時やワクチン接種時に。



セット内容の単品販売商品

○他、個人防護具関連製品を多数取り揃えております。セールスまでご相談ください。

YQD95 N95マスク個包装



N95マスク



商品コード	規 格	JANコード
643599	25枚	45 82465 112628

PAKION フェイスシールド



フェイスシールド



商品コード	規 格	JANコード
705129	20枚	49 68138 705128

ディスプレイロンAPY110 指掛



袖付エプロン



商品コード	規 格	JANコード
695000	10枚	49 68138 695009



プラスチック手袋

ヤマト プラスチック手袋Fit



商品コード	規 格	JANコード
692214	S 100枚	49 68138 692213
692221	M 100枚	49 68138 692220
692238	L 100枚	49 68138 692237

●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。●ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは

Yamato
http://www.yamatokj.co.jp

株式会社大和工場

〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL(06)6392-1731 FAX(06)6391-0632
(PCD709004/2021.05/AH)

DIA FIT MASK

ダイヤフィット マスク



口もと快適
立体構造

やわらか
幅広耳ゴム



小さめ
サイズ

形状

- マスクサイズ
レギュラー：ヨコ約205mm×タテ約80mm
小さめ：ヨコ約185mm×タテ約75mm
- 3層構造立体型サージカルマスク

素材

- 本体・フィルター部：ポリプロピレン
- 耳ひも部：ポリエステル・ポリウレタン
- ノーズフィッター：ポリエチレン

全国マスク工業会
会員マーク



特長

- 日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅢ適合品です。
- 快適立体構造で、口もととマスクの接触による不快感やメイク崩れを軽減します。
- ノーズフィット構造で鼻のラインにぴったりと合わせられます。
- 耳ひもはマスクと同色仕様で、柔らか幅広ゴムを使用しているため耳にやさしく、痛くなりにくい仕様となっております。
- 衛生的で持ち運びに便利な個別包装です。

※本品は、有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的では使用できません。

JIS適合表示

日本産業規格 JIS T 9001					
医療用マスク クラスⅢ 規格適合番号 M32209011					
適合番号発行元：JHPIA					
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa
適合判定	○	○	○	○	○
PFE:微粒子捕集効率			VFE:ウイルス飛まつ捕集効率		
BFE:バクテリア飛まつ捕集効率			※試験機関：(一財)カケンテストセンター測定		

商品コード	品名・規格	参考小売価	JANコード	梱入数
643674	ダイヤフィットマスク ホワイト 30枚	オープン	49 68138 643673	50
643681	ダイヤフィットマスク ベージュ 30枚	オープン	49 68138 643680	50
643698	ダイヤフィットマスク 小さめ ホワイト 30枚	オープン	49 68138 643697	48
643704	ダイヤフィットマスク 小さめ ベージュ 30枚	オープン	49 68138 643703	48

- 「参考小売価」は製品の本体価格です。消費税は含まれておりません。
- 製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。
- 掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは



株式会社大和工場
〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632
(2022.12/AH)

アルワッテCap[®]



【販売名】アルワッテCap

【成分】日本薬局方エタノール 83mL
(薬液100mL中)日本薬局方精製水 適量
医療脱脂綿 18.5g

【内容量】(1パック中)

〈104枚〉薬液 108mL 脱脂綿 (4cm×4cm、104枚) 20g
〈200枚〉薬液 208mL 脱脂綿 (4cm×4cm、200枚) 38.4g

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】使用时、本品を開いて脱脂綿を取り出し、そのまま手指に塗布又は塗擦する。

容器タイプ



特長

- *薬液を含浸した4cm×4cmの医療脱脂綿をパックした容器タイプの製品です。
- *使用量に合わせて、104枚、200枚からお選びいただけます。
- *開封後はキャップをすることで、より衛生的にお使いいただけます。
- *アルコール調製や管理にかかる労力等が不要となり、感染防止対策にも有用です。

規格

商品コード	品名・規格	参考小売価	JANコード	商品サイズ(mm) ケースサイズ(mm)	梱入数
732934	アルワッテCap 4cm×4cm 104枚	オープン	49 68138 732933	127×127× 39 540×402×361	24×4
732941	アルワッテCap 4cm×4cm 200枚	オープン	49 68138 732940	127×127× 70 540×402×327	12×4

●「参考小売価」は製品の本体価格です。消費税は含まれておりません。●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。
●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。●ご不明な点がございましたら、弊社セールスマスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは

amato
https://www.yamatokj.co.jp

株式会社大和工場

〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632
(PCD700384/2023.06/AH)

ヤマト

ニトリル手袋MD

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋
届出番号 27B3X00146000700



ASTM D6978-05 抗がん剤耐性試験実施済み
ASTM F739 薬剤耐性試験実施済み
食品衛生法 (厚生省告示第370号) 適合品
パウダーフリー・ラテックスフリー

優れたバリア性能とフィット感を 兼ね備えたニトリル手袋



1 抗がん剤耐性試験 (ASTM D6978-05)
実施済み。

3 食品衛生法 (厚生省告示第370号)
適合品。

2 薬剤耐性試験 (ASTM F739)
実施済み。

4 パウダーフリー・ラテックスフリー

サイズ	SS	S	M	L
全長 (mm:以上)	230			
掌幅 (mm)±10mm	70	80	95	110
厚み (mm:以上)	指先:0.05 / 掌:0.05			
ピンホール試験	AQL 1.5			

- ✓ 指先すべり止め加工
- ✓ 単回使用 (ディスポーザブル)
- ✓ 左右兼用
- ✓ 未滅菌

抗がん剤耐性試験結果 (ASTM D6978-05)

試験薬剤	濃度	透過時間	試験薬剤	濃度	透過時間
イダルビシン	1mg/mL	>240分	ドキシソルビシン塩酸塩	2mg/mL	>240分
イホスファミド	50mg/mL	22.9分	ドセタキセル	10mg/mL	>240分
イリノテカン	20mg/mL	>240分	トポテカン塩酸塩	1mg/mL	>240分
エトポシド	20mg/mL	>240分	トリクロサン	2mg/mL	>240分
エピルビシン	2mg/mL	>240分	パクリタキセル	6mg/mL	>240分
オキサリプラチン	5mg/mL	>240分	パラプラチン	10mg/mL	>240分
カルボプラチン	10mg/mL	>240分	ビノレルビン	10mg/mL	>240分
カルムスチン	3.3mg/mL	22.9分	ビンクリスチン硫酸塩	1mg/mL	>240分
ガンシクロビル	10mg/mL	>240分	ビンブラスチン硫酸塩	1mg/mL	>240分
クラドリビン	1mg/mL	>240分	フルオロウラシル	50mg/mL	>240分
クロロキン	50mg/mL	>240分	フルダラビン	25mg/mL	>240分
ゲムシタビン	38mg/mL	>240分	フルベストラント	50mg/mL	>240分
三酸化二ヒ素	1mg/mL	>240分	ペメトレキセド	25mg/mL	>240分
シクロスポリンA	100mg/mL	>240分	ベルケイド	1mg/mL	>240分
シクロホスファミド	20mg/mL	>240分	マイトマイシンC	0.5mg/mL	>240分
シスプラチン	1mg/mL	>240分	ミトキサントロン	2mg/mL	>240分
シタラビン	100mg/mL	>240分	メクロレタミン塩酸塩	1mg/mL	>240分
セツキシマブ	2mg/mL	>240分	メスナ	100mg/mL	>240分
ゾレドロン酸	0.8mg/mL	>240分	メトトレキサート	25mg/mL	>240分
ダウノルビシン	5mg/mL	>240分	メルファラン	5mg/mL	>240分
ダカルバジン	10mg/mL	>240分	ラルチトレキセド	0.5mg/mL	>240分
チオテパ	10mg/mL	38.4分	リツキシマブ	10mg/mL	>240分
デシタビン	5mg/mL	>240分	レトロビル	10mg/mL	>240分
テムシロリムス	25mg/mL	>240分			

47種類実施済み

薬剤耐性試験結果 (ASTM F739)

試験薬剤	濃度	透過時間	試験薬剤	濃度	透過時間
塩化ベンザルコニウム	50%	>480分	過酸化水素	30%	65.1分
グルコン酸クロルヘキシジン	4%	>480分	水酸化ナトリウム	40%	>480分
グルタルアルデヒド	4%	>480分	次亜塩素酸ナトリウム	10-13%	>480分

商品コード	品名・規格	参考小売価	JANコード	梱入数
734228	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー SS 200枚	オープン	49 68138 734227	10
734235	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー S 200枚	オープン	49 68138 734234	10
734242	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー M 200枚	オープン	49 68138 734241	10
734259	ヤマト ニトリル手袋MD ブルー L 200枚	オープン	49 68138 734258	10

●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。●ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは



株式会社大和工場

〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632
(PCD739902/2024.02/AH)

ヤマト

ヤマト サージカルガウン

AAMI レベル3相当
EOG滅菌済サージカルガウン



POINT 1


AAMI レベル3相当のバリア性

手術用ガウンに求められるAAMIレベル3に対応したSMS不織布を使用しています。

AAMI レベル3	衝撃透過性テスト(AATCC 42:2000)	≤ 1.0g
	静水圧テスト(AATCC 127:1998)	≥ 50cm


※AAMIレベルは米国内の製品を対象としていますので、本製品は未申請です。

※SMS不織布とは
低発塵性で液体バリア性が高く、強度のある長繊維
スパンボンド不織布で、フィルター性能の高い極細織
維不織布(メルトブローン)を挟んだ3層不織布。
耐水性やバクテリアバリア性に優れており、生地も柔
らかく、通気性にも優れています。

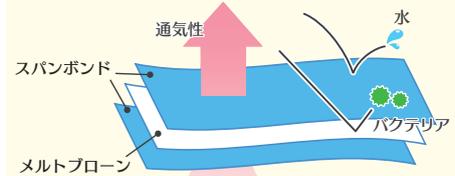

POINT 2

サージカルガウンの特長

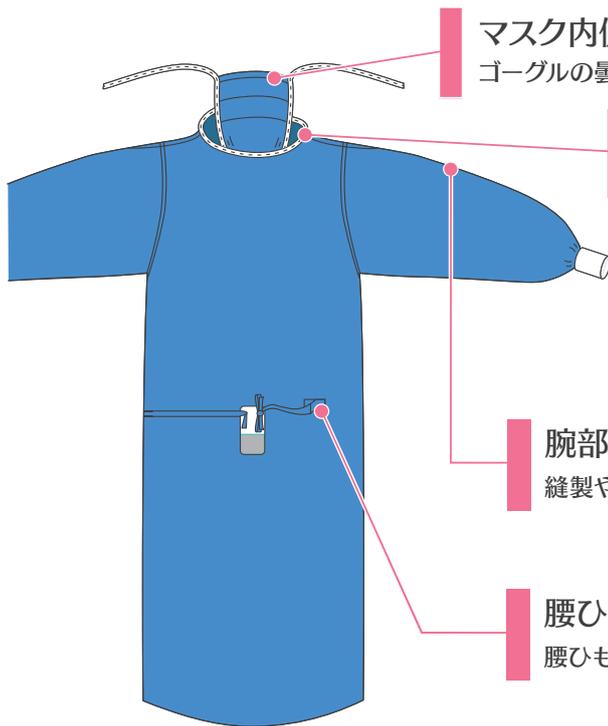

マスク内側の鼻筋部にスポンジを使用
ゴーグルの曇り対策やマスクのズレ防止に効果的です。



首元に面ファスナーを使用
面ファスナーと首ひもにより、首元のサイズ調整が容易になります。



腕部の接着にバーシールを使用
縫製や超音波溶着よりもバリア性が高まります。



腰ひもの接着にはテープを使用
腰ひも接着部の強度を高めます。



POINT 3

少ない入数で、在庫負担を減らせます。

商品コード	品名・規格	参考小売価	JANコード	梱入数
733504	ヤマトサージカルガウン M 16枚	オープン	49 68138 733503	2
733511	ヤマトサージカルガウン L 14枚	オープン	49 68138 733510	2
733528	ヤマトサージカルガウン LL 14枚	オープン	49 68138 733527	2
733535	ヤマトサージカルガウン マスク付 M 16枚	オープン	49 68138 733534	2
733542	ヤマトサージカルガウン マスク付 L 14枚	オープン	49 68138 733541	2
733559	ヤマトサージカルガウン マスク付 LL 14枚	オープン	49 68138 733558	2

●「参考小売価」は製品の本体価格です。消費税は含まれておりません。●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。
●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。●ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは

 <https://www.yamatokj.co.jp>

株式会社大和工場

〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632

(2023.08/AH)



もしもの時に備えませんか？

感染対策関連製品 ラインナップ


感染対策に必要なアイテムを充実のラインナップで
ご用意しています。



キャップ



シールド

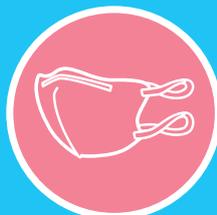

マスク



手袋



ガウン



シューズカバー

●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。
●ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは

 Yamato
<https://www.yamatokj.co.jp>

株式会社大和工場

〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632

(PCD709592/2023.04/AH)

個人防護具簡易セット(8種セット)

感染症対策に必要な個人防護具(PPE)一人分を一式取り揃えました。

熱性疾患や感染症患者の検診時や、往診・訪問看護等の在宅医療、PCR検査時の感染予防対策等にご使用いただけます。

【セット内容】

不織布ヘアキャップ(1枚)・N95マスク(1枚)・フェイスシールド(1枚)・袖付エプロン(1枚)・ニトリル手袋(2枚)・プラスチック手袋(2枚)・シューズカバー(2枚)・ゴミ袋(1枚)

※セット内容を変更した特注品の受注生産も10セットより承ります。

弊社セールスまで、お気軽にご相談ください。



不織布ヘアキャップ
キャップ単品製品:①

フェイスシールド
シールド単品製品:②・③

N95マスク
マスク単品製品:④・⑤

ニトリル手袋
プラスチック手袋
手袋単品製品:⑥・⑦

袖付エプロン
ガウン単品製品:⑧・⑨

シューズカバー
単品製品:⑩

単品商品一覧



②PAKIONフェイスシールド

医療従事者の顔面(眼、鼻、口腔の粘膜)を防護します。
曇り止め加工済みのシールド。
額部分のパッドには切れ込みが入っています。



④3Q N95マスク

NIOSHの防塵マスク規格、N95規格に適合したマスク。
衛生的な1枚個包装。
ゴム紐の長さを調節できるストッパー付。



⑥ヤマトニトリル手袋PF

食品衛生法適合の粉なしニトリル手袋です。
ラテックスフリー。
ホワイトもごございます。



⑧ディスポエプロン袖付

防水性のあるポリエチレン製の袖付使い捨てエプロンです。
手先から挿入して着用できる折りたたみ形式。
指掛タイプとゴム袖タイプがごございます。



⑩シューズカバー滑止付

靴の上から装着できる、不織布製の使い捨てシューズカバーです。
底部に滑り止め加工済み。



① ディスポキャップEM

不織布製の使い捨てヘアキャップです。



③ PAKIONアイシールド

医療従事者の顔面(眼の粘膜)を防護します。曇り止め加工済みのシールド。シールドのみ、フレームのみの商品もございます。



⑤ ヤマトメディソフトマスク

JIS規格の医療用マスククラスⅡ適合のマスクです。3層構造プリーツ型サージカルマスク。ポリエチレン製のノーズピースです。



⑦ プラスチック手袋Fit

汎用的な粉なしのプラスチック手袋。薄手タイプですので、手にしっかりフィットします。



⑨ アイソレーションガウン

不織布製の使い捨てガウンです。ゴム袖タイプと帯袖タイプ。防水ガウンもございます。



番号	商品コード	品名・規格
①		ディスポキャップEM
	705204	青 100枚 JAN: 4968138705203
	705211	白 100枚 JAN: 4968138705210
②		PAKIONフェイスシールド
	705129	20枚 JAN: 4968138705128
③		PAKIONアイシールドセット
	706263	10枚(シールド)+1本(フレーム) JAN: 4968138706262
④		3Q 個包装マスク N95
	641731	10枚 JAN: 6956382425723
⑤		ヤマトメディソフトマスク
	641557	ホワイト 50枚 JAN: 4968138641556
	641564	ブルー 50枚 JAN: 4968138641563
	641571	ピンク 50枚 JAN: 4968138641570
	641588	Sサイズ ホワイト 50枚 JAN: 4968138641587
	641595	Sサイズ ピンク 50枚 JAN: 4968138641594
⑥		ヤマトニトリル手袋PF
	688729	ブルー SS 100枚 JAN: 4968138688728
	683861	ブルー S 100枚 JAN: 4968138683860
	683878	ブルー M 100枚 JAN: 4968138683877
	683885	ブルー L 100枚 JAN: 4968138683884
⑦		プラスチック手袋Fit
	692214	Sサイズ 100枚 JAN: 4968138692213
	692221	Mサイズ 100枚 JAN: 4968138692220
	692238	Lサイズ 100枚 JAN: 4968138692237
	692986	LLサイズ 100枚 JAN: 4968138692985
⑧		ディスポエプロン袖付
	695000	APY110 指掛 10枚 JAN: 4968138695009
	709752	APG115 ゴム袖 10枚 JAN: 4968138709751
⑨		アイソレーションガウン
	881274	黄色 ゴム袖 50枚 JAN: 4968138881273
	650801	帯袖 50枚 JAN: 4968138650800
⑩		シューズカバー滑止付
	700063	青 100枚 JAN: 4968138700062
セット品	900791	個人防護具簡易セット JAN: 4968138900790

感染防護具(PPE)の着脱手順 (フェイスシールド装着の場合)

〈着用手順〉 手指衛生 → ガウン → マスク → キャップ → フェイスシールド → 手袋

手指衛生



ガウン



指掛タイプの場合は、袖口の穴に親指を通します。

マスク



マスクを鼻から顎までしっかり覆います。

キャップ



髪、耳がキャップから出ないようにしっかり覆います。

フェイスシールド



アイシールドの場合はアイシールド→キャップの順になります。

手袋



手首が露出しないよう、袖口も手袋で覆います。



〈脱衣手順〉 手袋とガウンを同時に外す時の手順(イラスト) 手袋・ガウン → 手指衛生 → フェイスシールド → キャップ → マスク → 手指衛生

🔊 手袋とガウンを別々に外す時の手順... 手袋 → 手指衛生 → フェイスシールド → キャップ → (手指衛生) → ガウン → 手指衛生 → マスク → 手指衛生

手袋・ガウン



汚染面が内側になるように丸めます。

手指衛生



フェイスシールド



シールドに触れないように、バンドを持って外します。

汚染がある場合は、手指衛生を追加します。

キャップ



キャップの後頭部部分をつまんで外します。

汚染がある場合は、手指衛生を追加します。

マスク



マスク表面に触れないように、耳の後ろからゴム紐を持って外します。

手指衛生



Tyvek® 製 滅菌バッグ プラズマ(H₂O₂)滅菌用

■ 製品特長

- デュポン™社製のタイベック®を使用した滅菌バッグです。
- ISO 11607-1 (JIS T 0841-1) に準拠した製品であり、CE認証及びFDA510 (K) 認証を取得しています。
- 両サイドに3本ずつのシールがあり、破袋予防とピール性の向上を実現しています。
また、EN868-5規格 (6mm以上) を満たしています。
- プロセスインジケータがフィルム面側に印刷されていますので、滅菌処理工程の確認と内容物の確認が同時に行えます。
- 別途インジケータが必要ですが、EOG滅菌も可能です。

■ インジケータ特長

- ISO 11140-1:2005 (Class1) に準拠したプロセスインジケータがフィルムと紙の間に印刷されていますので、被滅菌物と接触しません。

■ 滅菌処理後の色変化 ▶

※インジケータの色変化は印刷色のため、実際の色と多少の違いがあります。

	プラズマ(H ₂ O ₂)滅菌
滅菌処理前	
滅菌処理後	 青系の色に変わります

ロールタイプ

商品コード	規格	サイズ	参考小売価	JANコード
699800	TYFR-01	50mm×150m	8,500円	49 68138 699809
699817	TYFR-02	75mm×150m	12,500円	49 68138 699816
699824	TYFR-03	100mm×150m	16,500円	49 68138 699823
699831	TYFR-04	150mm×150m	24,500円	49 68138 699830
699848	TYFR-05	200mm×150m	32,500円	49 68138 699847
699855	TYFR-06	250mm×100m	27,000円	49 68138 699854
699862	TYFR-07	320mm×100m	34,500円	49 68138 699861
699879	TYFR-08	430mm×100m	45,000円	49 68138 699878
699886	TYFR-09	490mm×100m	51,500円	49 68138 699885

●「参考小売価」は製品の本体価格です。消費税は含まれておりません。●製品仕様およびデザインは製品改良などのため変更になることがありますので、ご了承ください。●掲載の商品写真は印刷物のため、実際の色調と若干異なる場合があります。●ご不明な点がございましたら、弊社セールスまでお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは



株式会社大和工場
〒532-0006 大阪市淀川区西三国4-3-75
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632
(PCD696731/2024.04/AH)

滅菌バッグ 製品案内

滅菌バッグ AC滅菌・EOG滅菌 両用

取得認証: FDA・EN 868・ISO 11607 & 11140-1



Tyvek® 製 滅菌バッグ プラズマ(H₂O₂)滅菌用

取得認証: FDA・EN 868・ISO 11607 & 11140-1



滅菌バッグ

AC滅菌・EOG滅菌 両用

製品特長

- ISO 11607-1 (JIS T 0841-1) に準拠した製品であり、CE認証及びFDA510 (K) 認証を取得しています。
- 両サイドに3本ずつのシールがあり、破袋予防とピール性の向上を実現しています。
また、EN868-5規格 (6mm以上) を満たしています。
- AC滅菌用とEOG滅菌用のプロセスインジケータがフィルム面側に印刷されていますので、滅菌処理工程の確認と内容物の確認が同時に行えます。
- 開封時に紙粉の発生が少ない滅菌紙を使用しています。

インジケータ特長

- ISO 11140-1:2005 (Class1) に準拠したプロセスインジケータがサイドシール部分のフィルムと紙の間に印刷されていますので、被滅菌物と接触しません。
- 紙面より入った滅菌剤 (ACの蒸気またはEOガス) に反応してインジケータが変色しますので、滅菌剤がバッグ内の被滅菌物に到達していることがわかります。

滅菌処理後の色変化

※インジケータの変色は印刷色のため、実際の色と多少の違いがあります。

	AC滅菌	EOG滅菌
滅菌処理前	蒸気滅菌後 薄青 > 濃緑	EO滅菌後 橙 > 黄色
滅菌処理後	蒸気滅菌後 薄青 > 濃緑	EO滅菌後 橙 > 黄色
	濃緑系の色に変わります	黄系の色に変わります

ロールタイプ

商品コード	規格	サイズ	参考小売価	JANコード
699466	SMFR-022	50mm×200m	4,700円	49 68138 699465
699473	SMFR-032	75mm×200m	6,200円	49 68138 699472
699480	SMFR-042	100mm×200m	8,000円	49 68138 699489
699497	SMFR-062	150mm×200m	12,000円	49 68138 699496
699503	SMFR-082	200mm×200m	15,300円	49 68138 699502
699510	SMFR-102	250mm×200m	17,800円	49 68138 699519
699527	SMFR-122	300mm×200m	29,400円	49 68138 699526
699534	SMFR-142	350mm×200m	30,000円	49 68138 699533
699541	SMFR-162	400mm×200m	32,000円	49 68138 699540
699558	SMFR-202	500mm×100m	24,000円	49 68138 699557

マチ付ロールタイプ

商品コード	規格	サイズ	参考小売価	JANコード
699312	SMGR-041	100mm×40mm×100m	7,800円	49 68138 699311
699329	SMGR-061	150mm×50mm×100m	9,800円	49 68138 699328
699336	SMGR-081	200mm×55mm×100m	12,000円	49 68138 699335
699343	SMGR-101	250mm×60mm×100m	14,400円	49 68138 699342
699350	SMGR-121	300mm×70mm×100m	17,800円	49 68138 699359
699367	SMGR-141	350mm×80mm×100m	24,400円	49 68138 699366
699374	SMGR-161	400mm×80mm×100m	27,800円	49 68138 699373

パウチタイプ

商品コード	規格	サイズ	枚数	参考小売価	JANコード
699381	SMFP075200	75mm×200mm	800枚	6,600円	49 68138 699380
699398	SMFP075300	75mm×300mm	800枚	8,800円	49 68138 699397
699404	SMFP100200	100mm×200mm	800枚	10,280円	49 68138 699403
699428	SMFP150300	150mm×300mm	800枚	17,120円	49 68138 699427
699435	SMFP200400	200mm×400mm	400枚	15,280円	49 68138 699434
699442	SMFP250450	250mm×450mm	400枚	20,800円	49 68138 699441
699459	SMFP300500	300mm×500mm	400枚	26,000円	49 68138 699458

正しくお使い頂くために

- 滅菌バッグは一回限りの使用です。再使用はしないでください。
- 破裂を防ぐため、被滅菌物の大きさに応じたサイズの滅菌バッグをご使用ください。
- 滅菌バッグに印刷してあるインジケータは滅菌工程管理用であり、滅菌効果の確認のために使用するものではありません。
- 被滅菌物が汚れた状態や濡れた状態でパックすると、温度上昇の遅れや浸透の遅れによる滅菌不良、バッグの破損、インジケータの変色不良、菌バリア性低下の原因になります。